


Fiche technique

PESSAIRE

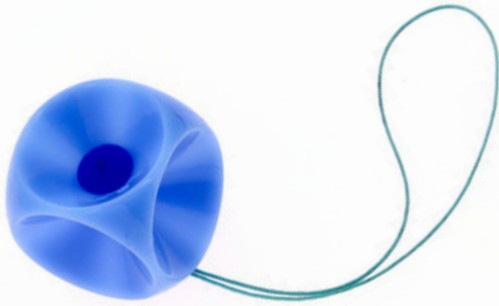

*Existe en taille : 29mm, 32mm & 37mm

Cube en silicone

CONTRE INDICATIONS

- Présence d'infection pelvienne ou de lacérations
- La patiente n'est pas prête à collaborer (notamment pour le Cube)
- Une endométriose
- La décision d'utiliser un pessaire chez la femme enceinte est laissée au praticien.

AJUSTEMENT D'UN PESSAIRE

Il n'existe pas d'appareil infaillible pour déterminer la grandeur et le modèle idéal du pessaire requis pour un cas particulier. En fonction du type d'affection, de sa sévérité mais aussi de la physiologie de la patiente, le praticien sera le seul juge dans le choix du pessaire adéquat. Avant même d'ajuster un pessaire, la patiente doit être informée qu'il n'est pas rare d'avoir à changer de grandeur ou de modèle de pessaire plus d'une fois avant de trouver le pessaire idéal. C'est la raison pour laquelle, la patiente doit revoir son médecin dans les 24 heures après le premier ajustement et à nouveau 72 heures après. Par la suite, un suivi aux 4 à 6 semaines est recommandé tant que la patiente porte le pessaire. A chaque visite, le pessaire doit être enlevé et la voûte vaginale inspectée de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de réaction allergique ou de pression induite sur les parois vaginales.

La plupart des pessaires sont trop difficiles à insérer ou à retirer pour que la patiente puisse le faire elle-même, c'est pourquoi nous recommandons qu'il soit inséré et retiré par un professionnel de santé. Les pessaires de modèle CUBE sont les exceptions à cette règle. La patiente doit pouvoir l'insérer, le retirer et le nettoyer tous les jours elle-même. Le pessaire utilisé doit généralement avoir la plus grande taille avec laquelle la patiente se sente confortable. L'expérience a démontré que pour réussir un bon ajustement de pessaire, il faut essayer les pessaires les plus fréquemment utilisées, à savoir 3 ou 4 tailles.

AVANTAGES DU SILICONE

- Hypo-allergène
- Longue durée de vie
- Flexibilité
- Peut être stérilisé à l'autoclave

ENTRETIEN DU PESSAIRE

Le pessaire est enduit de poudre de qualité alimentaire. Il faut le laver avec un savon doux, le rincer à l'eau et le sécher avant l'utilisation initiale.

1/ Pour la patiente :

Pour le pessaire cubique, chaque soir après le retrait du pessaire, la patiente devra le laver avec du savon liquide et de l'eau.

2/ Pour le praticien :

Pour ses essais le praticien devra stériliser les pessaires utilisés après leur utilisation. Après nettoyage, les pessaires se stérilisent à l'autoclave, 134 °C, cycle prion.