


Fiche technique RECTOMAX

sonde rectale

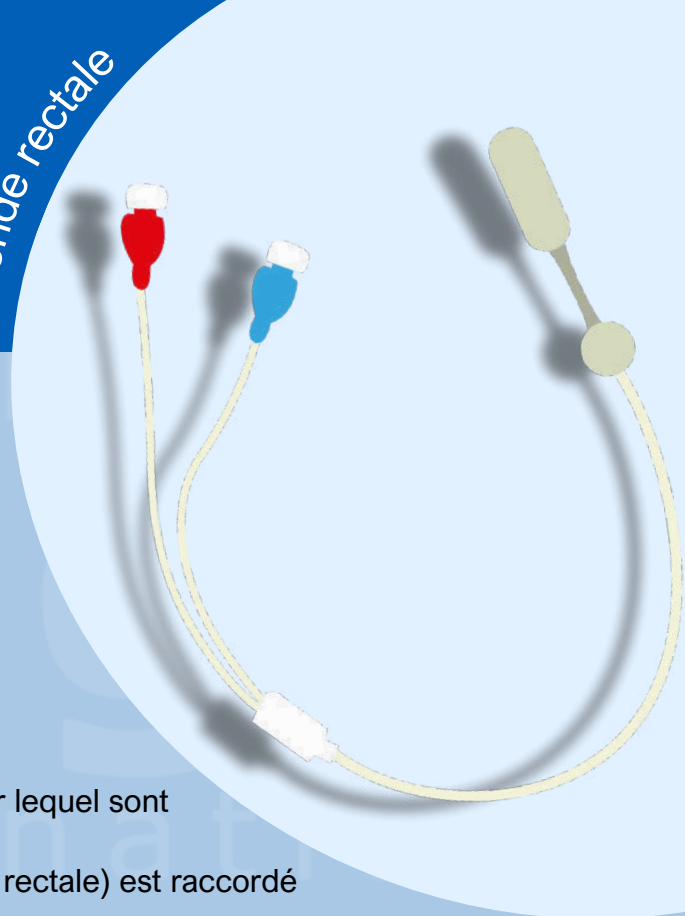

CARACTÉRISTIQUES

- **Connexion** : luer femelle
- **Diamètre** : 1,7 cm
- **Longueur** : 30 cm
- **Poids** : 7g
- Contient du **latex**

PRÉSENTATION

Cette sonde est composée d'un corps en Pebax à 2 voies sur lequel sont ligaturés deux ballonnets en latex.

1. Le plus grand ballonnet (pour la distension de l'ampoule rectale) est raccordé au luer bleu.
2. Le plus petit ballonnet (à placer sous le sphincter) est raccordé au luer rouge.

INTÉRÊT PRATIQUE DE LA SONDE

Cet outil est indispensable pour les praticiens désireux de traiter les pathologies de la sphère ano-rectale. A l'aide d'appareils disposant d'une ou deux voies pression, on peut aisément :

1 - Mesurer

- La sensibilité rectale consciente
- Les seuils des besoins
- Le volume rectal maximum tolérable

2 - Rechercher

- Les réflexes intrinsèques inhibiteurs et constricteurs
- La contraction volontaire anale maximale du sphincter externe
- L'asynchronisme abdomino-périnéal

3 - Rééduquer

- Les seuils de perception
- Les poussées défécantes et les asynchronismes
- Le plancher pelvien (SAE)

RECOMMANDATION

- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant de l'ouvrir, puis le conserver afin d'y ranger la sonde après chaque utilisation,
- Couvrir la sonde avec une protection non lubrifiée sans réservoir avant chaque utilisation,
- Lubrifier le canal anal avant insertion, la sonde doit être manipulée avec des gants d'examen,
- L'introduction doit se poursuivre de telle sorte que le repère circulaire le plus près du petit ballon arrive au niveau de la marche anale,
- Être attentif à l'introduction de la sonde en cas de sphincter hypertonique,
- Le temps d'utilisation ne doit pas excéder 1 heure en continu par séance,
- Ne pas gonfler les ballonnets avant insertion, Ne pas remplir le ballonnet de distension de l'ampoule rectale au delà de 350 ml d'air, Ne pas remplir le ballonnet "de mesure" au delà de 1,5 ml d'air, Dégonfler les ballonnets avant de retirer la sonde, puis retirer le préservatif,
- Ne pas stériliser,
- Ne pas utiliser de détergent ou autres produits incompatible avec le latex

